

Mini-presentasjon

SYKEHUS & VAKSINESENTER



OXINE® PRO Desinfeksjon

Til harde overflater - klar til bruk

- Fjerner bakterier og virus raskt og effektivt
- Bakterier blir ikke immune - **Fjerner effektivt biofilm**
- Skånsom mot mennesker, dyr og natur
- Dokumentert effekt mot **SARS-CoV-2** (Covid-19)
Poliovirus **Norovirus** (omgangssyken)
Virketid **60 sekunder**

Hvordan bruke Oxine Pro Desinfeksjon?

Påfør middelet med klut, spray, pumpe eller FOG-maskin på området som skal desinfiseres. Oxine Pro fungerer når det tørker, så overflater og atmosfære trenger bare å være lett fuktet for at det skal være effektivt. Påfør jevnt. Du trenger ikke vaske bort produktet, la tørke – men produktoverskudd kan fjernes etter anbefalt virketid. **Bruk av Oxine Pro krever ikke verneutstyr.**

Ved regelmessig bruk av Oxine Pro overflatedesinfeksjon vil du holde alt av instrumenter og generelle flater rene og forhindre at bakterier og mikroorganismer får etablert seg, samt beholde ett godt innemiljø.

Alkohol- og klorfri

Ikke brennbar - Ikke korrosiv


Bruksområder/ Eksempler

Alle instrumenter
Resepsjon og kundeområde
Stoler og bord
Stetoskop, stativ og maskiner
Dørhåndtak, lysbrytere etc.
Senger og nattbord
Toaletter, toalettstoler, bad etc.



European Hygiene Tech AS
Skjergaardsvegen 333, 5353 STRAUME
Tlf: 905 95 044

E-post: post@eht-as.no
www.eht-as.no

 Følg oss gjerne!

SE SIKKERHETDATABLAD
OG BRUK QR-KODE FOR
MER INFORMASJON

